

Guía de indicadores luminosos

- El chip reutilizable incluye una luz para indicar el estado de la batería y las conexiones/emparejamientos

Color	Descripción	Próximos pasos
Verde	<ul style="list-style-type: none">Inserción exitosa del chip en el sensor	<ul style="list-style-type: none">Siga las instrucciones de la aplicación para emparejar
Azul	<ul style="list-style-type: none">Emparejamiento exitoso de chip con dispositivo móvil y aplicación	<ul style="list-style-type: none">Verifique la conexión del sensor para que el dispositivo principal pueda recibir datos
Púrpura	<ul style="list-style-type: none">No se ha quitado la pestaña del sello de la batería para activar la bateríaLa batería está obstruida	<ul style="list-style-type: none">Retire la pestaña para activar la bateríaConsulte las instrucciones de uso del sensor inalámbrico Radius PPGDesconecte el chip reutilizable del sensor, espere 30 segundos, inserte el chip en el sensor
Naranja	<ul style="list-style-type: none">Batería baja del sensor	<ul style="list-style-type: none">Reemplace el sensor, no deseche el chip reutilizable
Rojo	<ul style="list-style-type: none">Batería del sensor agotadaCódigo de falla en hardware, sensor, placa de chip intermitente	<ul style="list-style-type: none">Reemplace el sensor, no deseche el chip reutilizable. Si el problema persiste, reemplace el chip reutilizable.Póngase en contacto con el soporte técnico de Masimo o reemplace el sensor y el chip

