

Advertencia: No se autodiagnostique ni automedique en base a las mediciones. Siempre consulte a su médico.

CONOZCA SU SISTEMA

Aplicación Masimo SafetyNet

Masimo SafetyNet muestra la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y otros datos de Radius PPG. También le permite a su proveedor de atención actualizar datos.

Radius PPG

Sensor

Si lo usa en la muñeca y la yema del dedo, el sensor recopila sus datos.

Chip

El chip, incrustado en la parte del sensor sobre la muñeca, envía sus datos a la aplicación Masimo SafetyNet.

1 Aceptar la invitación de Masimo SafetyNet

La invitación se enviará a su correo electrónico. Después de aceptar, descargue la aplicación Masimo SafetyNet y siga las instrucciones de configuración.

2 Colocar el sensor

Revise las instrucciones en la parte posterior sobre cómo colocar el sensor en su muñeca y dedo, e insertar el chip.

3 Emparejar Radius PPG

En **Settings (Configuraciones)** de la aplicación Masimo SafetyNet, ingrese al menú **Add Device (Agregar dispositivo)**, y siga las instrucciones para emparejar la Radius PPG a su teléfono.


Para obtener más información, visite:
masimo.com/masimo-safetynet

consulte el reverso para obtener información sobre la aplicación del sensor


Cómo colocar el sensor

2.1 Configuración del sensor


1. Retire el sensor de la bolsa

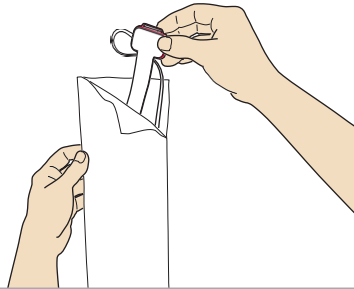


2. Despegue la etiqueta amarilla para activar la batería

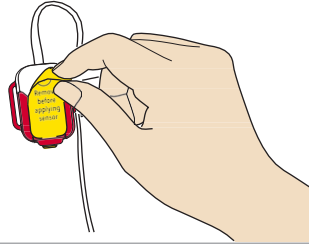

3. Coloque el sensor en la muñeca como se muestra y pase cuidadosamente la punta de la correa por el orificio del pasador rojo

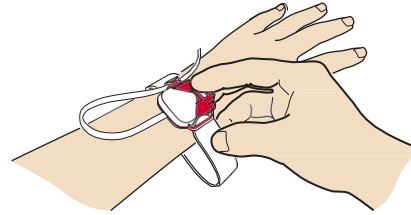


4. Enrolle el extremo suelto de la correa alrededor de su muñeca y presione

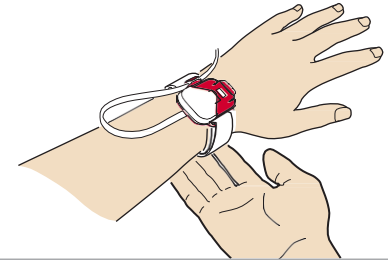

2.2 Colocar el sensor de dedo


1. Despegue parte de la cinta adhesiva y coloque la estrella (✱) sobre la uña del dedo anular

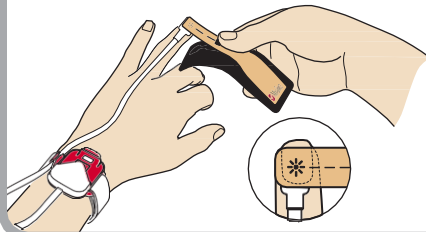


2. Enrolle hasta la mitad del dedo. Procure que la estrella y el cuadrado queden alineados directamente uno frente al otro




3. Apriete la parte superior e inferior de la envoltura para asegurar

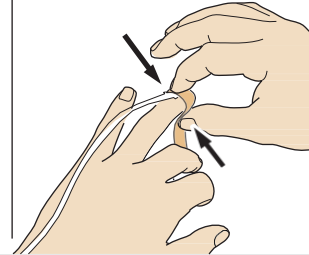

4. Despeje el resto de la cinta adhesiva y continúe enrollando el resto alrededor del dedo

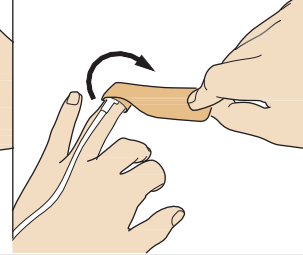


5. Ajuste el cable de modo que quede a un largo cómodo



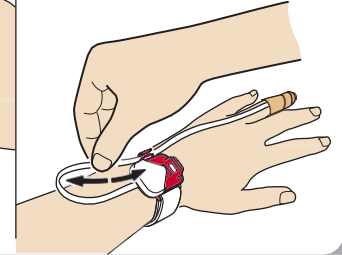


2.3 Introducir el chip


1. Introduzca el chip en el compartimento abierto del sensor

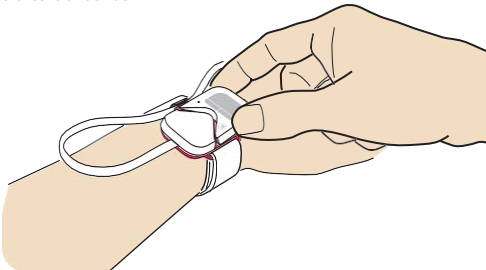

2. Presione hacia abajo el chip para asegurarlo

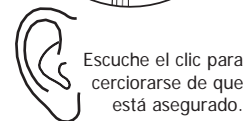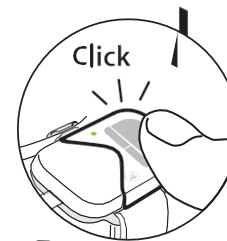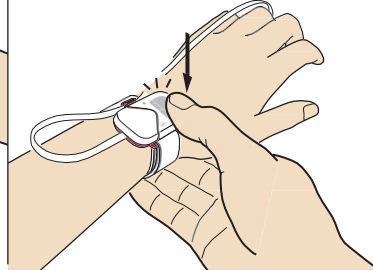

Escuche el clic para cerciorarse de que está asegurado.

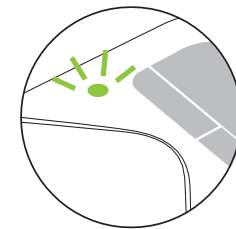

Observe si se enciende la luz para confirmar la conexión.